


Мы открыли удаленный доступ к программному обеспечению системы Vita CR через Internet Explorer .

Для доступа нужно в адресную строку ввести <http://85.143.105.211:880/imagesuite>


Откроется диалоговое окно, где нужно ввести ИД пользователя, пароль, роль.

Т.к. систем поддерживает только 4 одновременных подключения, для входа используются следующие сочетания ИД Пользователя и паролей. Если вход не получился с одним сочетание, попробуйте другое.


1. ИД Пользователя: Врач, Пароль: врач12, Роль: Врач
2. ИД Пользователя: Врач1, Пароль: врач11, Роль: Врач
3. ИД Пользователя: Врач2, Пароль: врач22, Роль: Врач
4. ИД Пользователя: Врач3, Пароль: врач33, Роль: Врач

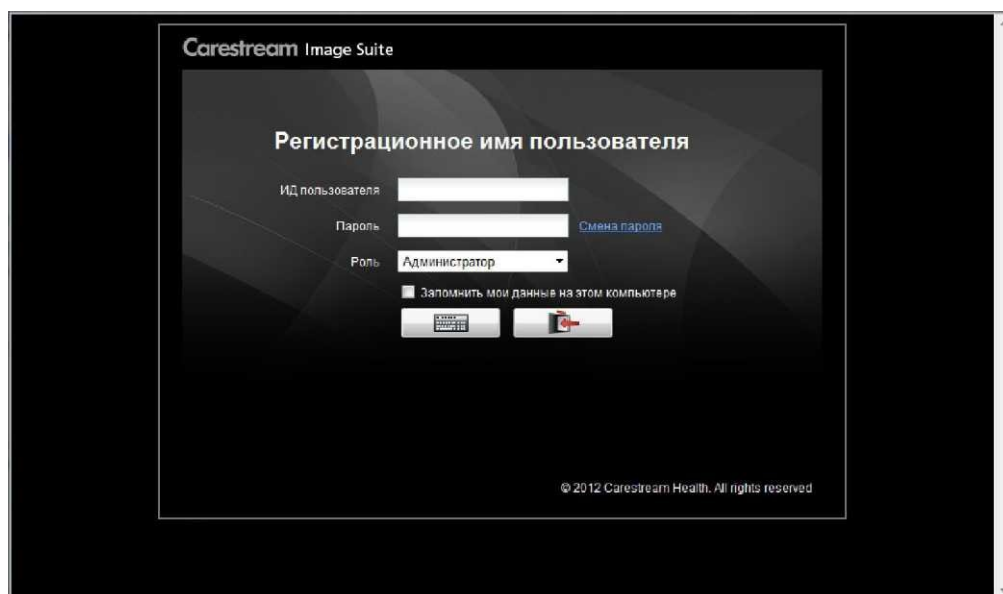

После входа в систему откроется окно список приема пациентов

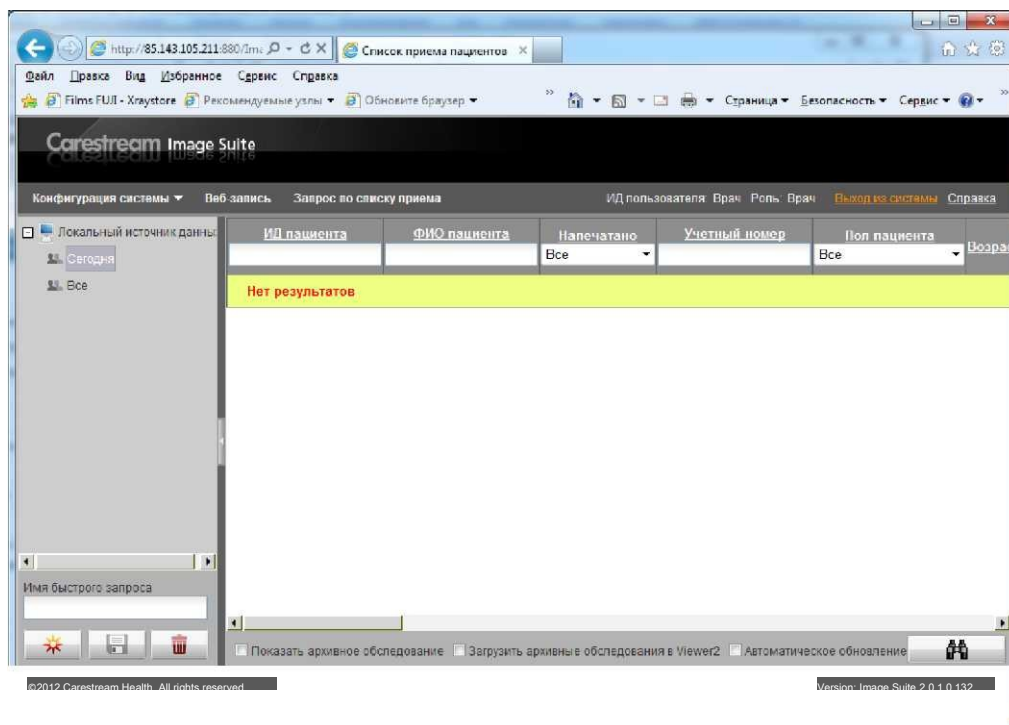


Слева в поле Локальный источник данных нужно нажать надпись Все для перехода к списку изображений

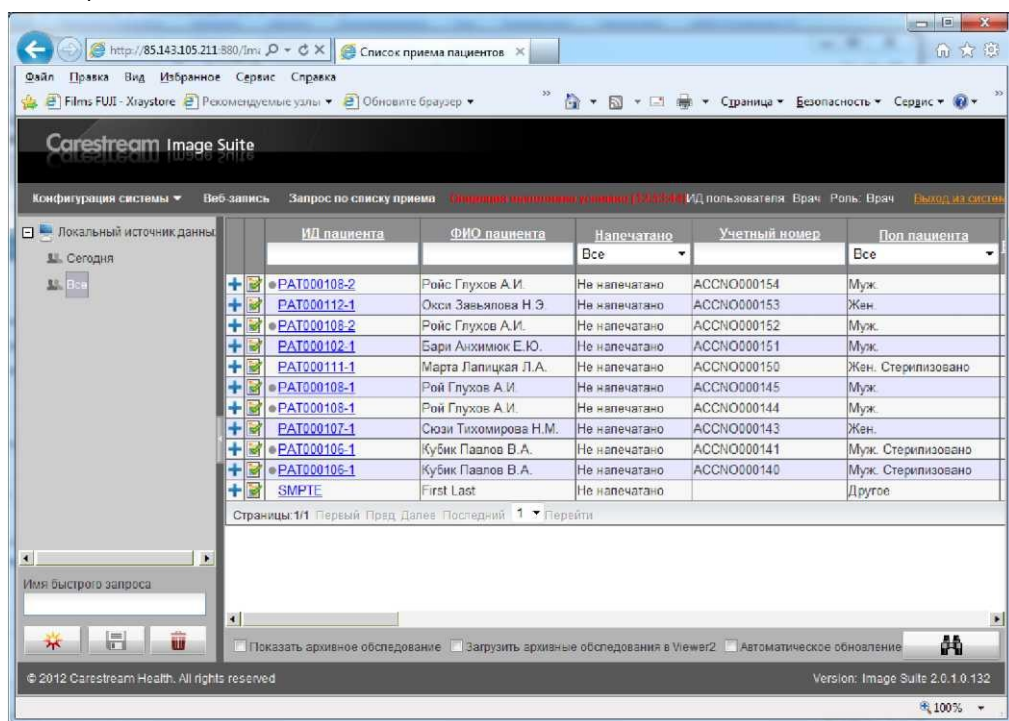


В базе данных находится несколько изображений.

Для просмотра изображений нужно нажать ссылку соответствующего изображения, которые имеют следующий вид [PAT000112-1](#)


После этого откроется новое окно. Нужно выбрать Загрузите ActiveX и установите его

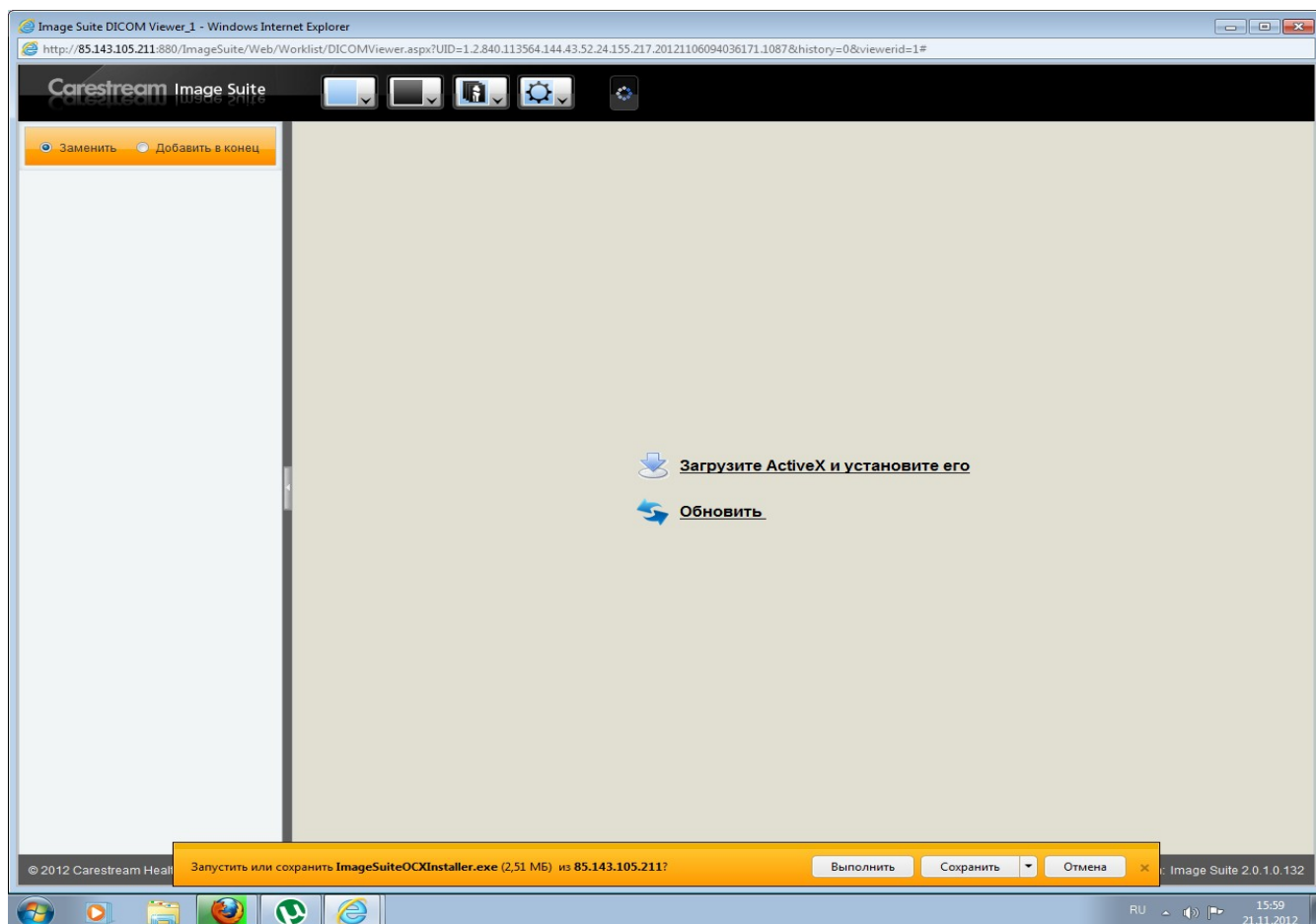


После установки ImageSuiteOCXInstaller.exe появится окно

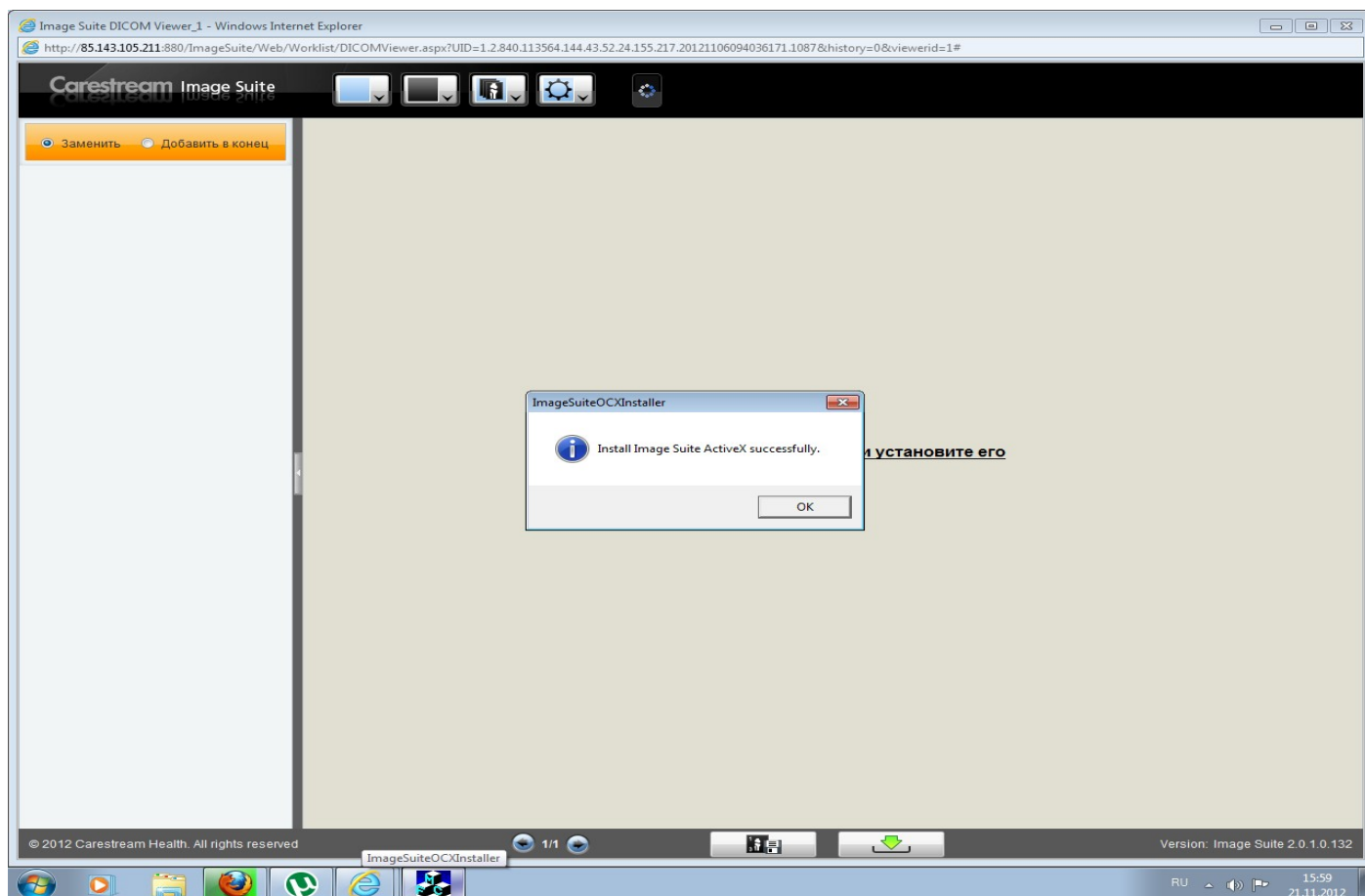

Нажимаем ОК. Появиться следующее окно

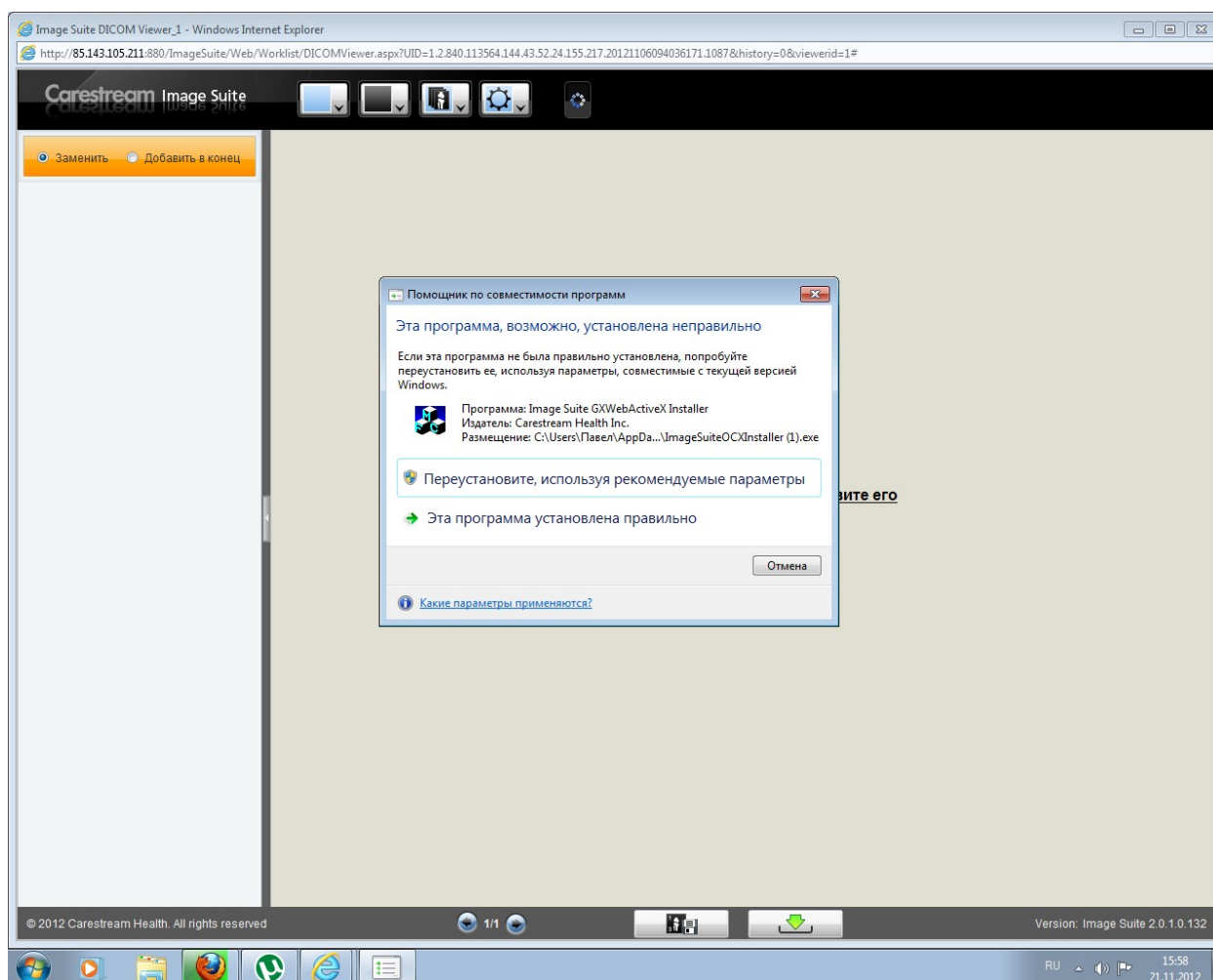

Выбираем- Эта программа установлена правильно. После этого закрываем все окна и вновь открываем окно с диалогом для ввода пароля и логина. Входим в систему. Открывается список исследований. Нажимаем на ссылку на изображение. Открывается следующее окно

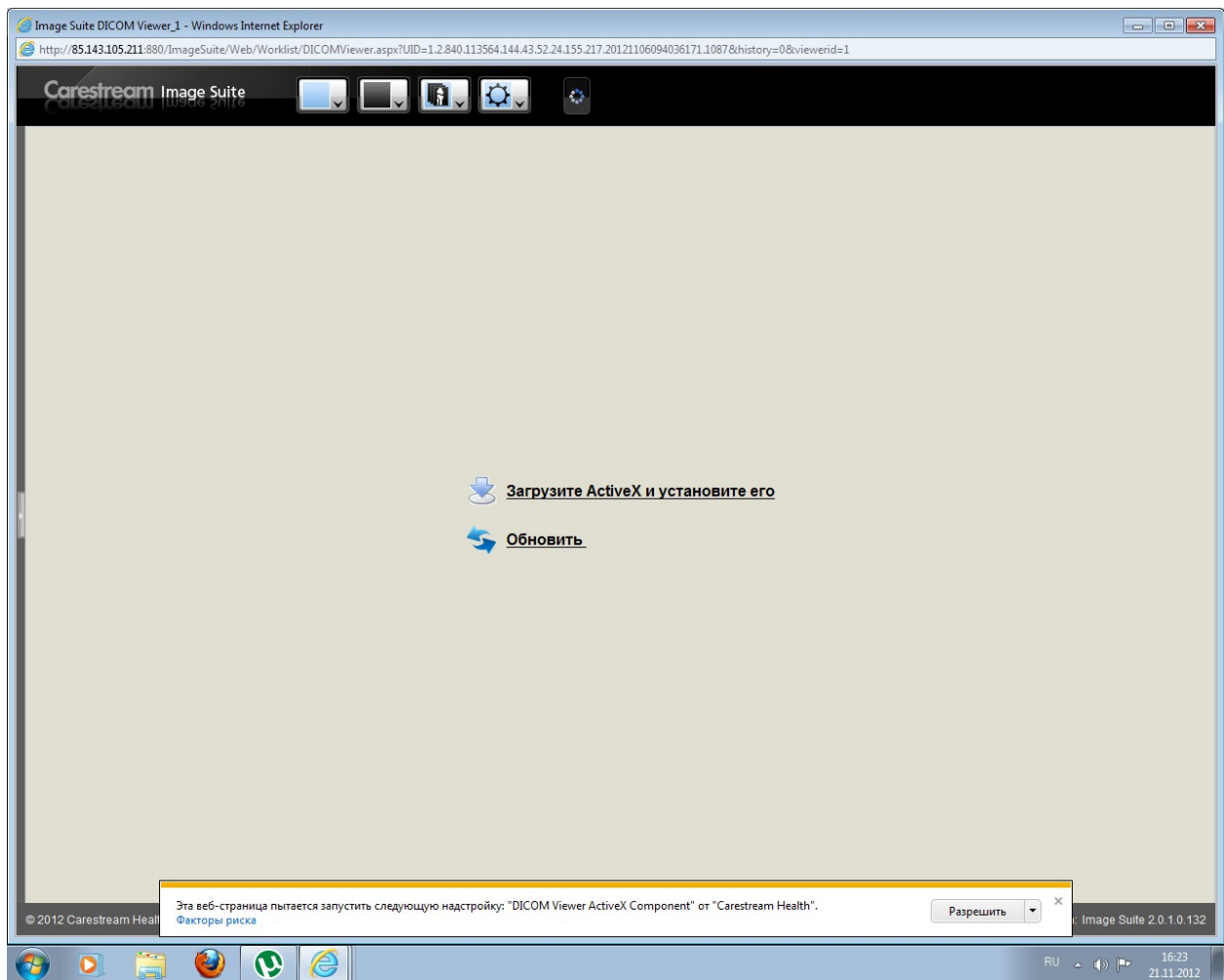

Разрешаем выполнение надстройки.

Если изображение загрузилось в инвертированном виде, нужно нажать на панели инструментов кнопку инвертировать для возвращения к обычному виду изображения.

На панели инструментов доступны инструменты для работы с изображениями.

кнопка инвертировать

